


Attends® Soft



Gebruiksaanwijzing



- 1 Verwijder de zelfklevende plakstrook aan de onderzijde van de inlegger.

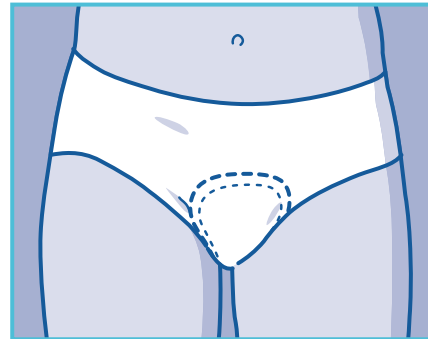

- 2 Bevestig de inlegger in uw eigen ondergoed met de plakstrook naar onderen. Zorg dat u goed aansluitend ondergoed gebruikt.

Hints en Tips

Productkeuze

- De juiste absorptiecapaciteit en het meest geschikte product is afhankelijk van de mate van incontinentie. De beslisboom en het numerieke systeem van Attends zijn daarbij zeer behulpzaam.
- Voor een optimaal en betrouwbaar resultaat is het belangrijk dat het gekozen product op de juiste manier bevestigd wordt in goed aansluitend ondergoed.
- Grotere producten zijn niet per definitie altijd veiliger. Een gerichte productkeuze biedt meer waardigheid en comfort voor de gebruiker.

Verwijderen van het product

- Rol de inlegger na gebruik op en deponeer deze in de daarvoor bestemde milieu- of verwijderingsbak.
- Attends Soft 1 - 3+ zijn per stuk verpakt. Deze zakjes kunnen ook gebruikt worden om het product na gebruik in te rollen en in de daarvoor bestemde milieu- of verwijderingsbak te deponeren.
- Spoel de inlegger na gebruik nooit door het toilet.



Attends Soft is getest en goedgekeurd door proDERM, Instituut voor toegepast dermatologisch onderzoek.

Wilt u meer informatie? Bezoek: www.attends.nl