
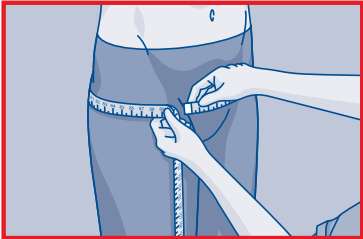



Attends® Pull-Ons

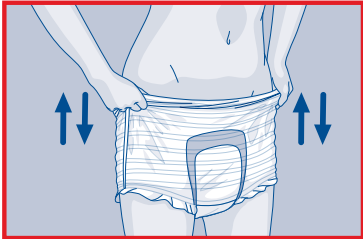


Gebruiksaanwijzing

- 1** **Vorbereiding**

Maak gebruik van het speciale Attends meetlint en meet daarmee de heup of omvang van het middel. Op het meetlint of de assortimentskaart van Attends kunt u de benodigde maat handig aflezen.
- 2** **Gebruik**

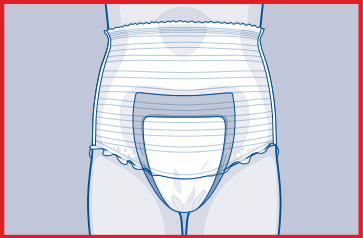Attends Pull-Ons kunnen worden gedragen zoals normaal ondergoed. U kunt het broekje optrekken en uittrekken zo vaak als nodig is.
- 3** **Pasvorm**

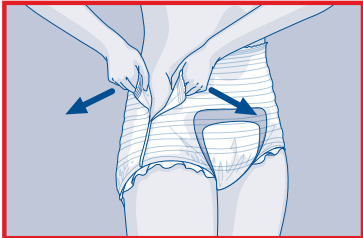De broekjes zijn vervaardigd van elastisch en huidvriendelijk ademend materiaal zodat deze comfortabel aanvoelen tijdens het dragen.
- 4** **Verwijderen**

Het verwijderen van de Attends Pull-Ons is na gebruik zeer eenvoudig: U kunt deze uittrekken zoals u gewend bent of indien nodig de zijken open-scheuren zodat deze veilig verwijderd kan worden.

Hints en Tips

Productkeuze

- Maak gebruik van het speciale Attends meetlint en meet daarmee de heup- middelomvang. Op het meetlint of de assortimentskaart van Attends kunt u de benodigde maat handig aflezen.
- De juiste absorptiecapaciteit en het meest geschikte product is afhankelijk van de mate van incontinentie. De beslisboom en het numerieke systeem van Attends is daarbij zeer behulpzaam.
- Attends Pull-Ons zijn uitermate geschikt voor mensen die aan toilettraining doen en behoefte hebben aan de zekerheid van een absorberende inlegger.

Aantrekken

- Zorg ervoor dat het product correct is aangetrokken, dus de voor- en achterzijde op de juiste positie. De achterzijde herkent u aan de gekleurde band, behalve bij de 5XS. Hierbij zit de gekleurde band aan de voorzijde.

Verwijderen

- Rol de Pull-On na gebruik op en deponeer deze in de daarvoor bestemde milieu- of verwijderingsbak.
- Spoel de Pull-On na gebruik nooit door het toilet.



Attends Pull-Ons zijn getest en goedgekeurd door proDERM, Instituut voor toegepast dermatologisch onderzoek.

Wilt u meer informatie? Bezoek: www.attends.nl